

# HYDRUX

CAMILLA EXAMEN Y RECUPERACIÓN ZR 4 PLANOS BP  
Ref.4424 PANAMA





## COMODIDAD Y DINAMISMO

Una solución de camilla de transporte con excelente maniobrabilidad diseñada para traslados, eficacia y resistencia al rigor del entorno sanitario.

## DISEÑO Y SEGURIDAD

### SUPERFICIE DE PACIENTE

De cuatro secciones: una fija y tres móviles, fabricadas en acrílico radiolúcido, apta para toma de rayos-X en toda su extensión.



### RUEDA PARACHOQUES

Para la protección tanto de la camilla como de las paredes de la institución en caso de impacto.




### ASAS DE EMPUJE

Ergonómicas NO plegables, útiles para la fácil operación del transporte.

### BARANDAS DE SEGURIDAD

De una sección, plegables, fabricadas en polímero de alta resistencia y cubierta de aluminio. Su operación es simple y con una sola mano, facilitando la operación del personal asistencial.

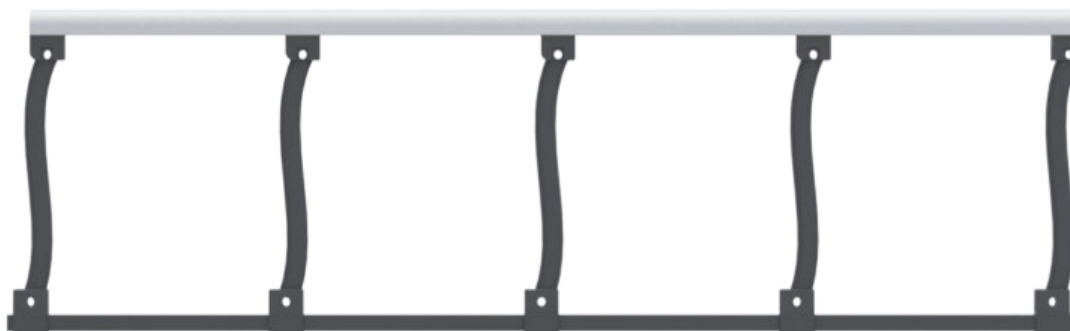

Seguro de liberación baranda.




## COLCHONETA

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Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad,  $26 \pm 2 \text{ Kg/m}^3$ . Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex.

## OPCIONES DE COLOR\*

Personalice el tapizado de la colchoneta de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.



AZUL  
REY



BRAVIA  
MORA



GRIS



NARANJA



NEGRO



TURQUESA



VERDE  
MANZANA

\* Con costo adicional. Solicite la guía de acabados completa.

\* Los cambios de color pueden afectar al plazo de entrega; consulte con su ejecutivo de cuentas.

\* El cambio de color requiere un pedido mínimo de 10 unidades.



## AJUSTE PIES

Manija retráctil fabricada en polímero de alta resistencia que permite al personal asistencial llevar la camilla a diferentes posiciones.



## AJUSTE ESPALDAR

Soporte fácil, ágil y seguro para ajustar la camilla en las posiciones requeridas, facilitando la labor del personal asistencial y mejorando la experiencia del paciente.



## RUEDAS Y FRENO

Fabricadas en poliuretano, libres de mantenimiento, pedales en las esquinas para activar freno, minimiza el riesgo de lesiones por caídas durante el ingreso y egreso del paciente.



## AJUSTE DE ALTURA, TRENDLENBURG E INVERSO

Movimientos de mano libre asistidos por pedales en ambos lados de la camilla.

## SOPORTE TANQUE OXÍGENO

Ubicado en la cubierta inferior.

## QUINTA RUEDA RETRÁCTIL

Reduce el riesgo de colisión al mejorar el control en trayectorias rectas y curvas.



## SOPO RTE PLACAS RAYOS - X

Porta chasis para taransporte de placas para rayos-X, se ajusta de forma fácil a diferentes tamaños, recorrido por todo el tendido.

Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos usados en hospitales como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol antiséptico.



PORTA SUERO

Graduable, plegable o desmontable.  
Con cuatro ganchos de doble  
servicio. Capacidad de carga 28.6 lb  
(13 Kg).



PEDESTAL DOBLE

Movimientos de mano libre  
asistidos por pedales en ambos  
lados de la camilla.

## SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio. De fácil configuración, posiciones que aportan en el traslado, descanso, tratamiento y recuperación del paciente.



Flexión espalda




Flexión rodillas\*



Horizontal



Trendelenburg

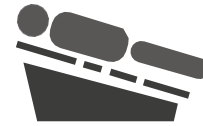

Trend. Inverso



Cambio altura

\*Ver cuadro de especificaciones.






## ERGONOMÍA Y DURABILIDAD

Ideal para ambientes hospitalarios, estructura en acero de alta resistencia y acero inoxidable, ruedas y apliques fabricados en polímero, resistente y anti bacterial; una combinación precisa de materiales para brindar soporte, confort y confiabilidad.

# DIMENSIONES\*

Altura mínima

Altura máxima

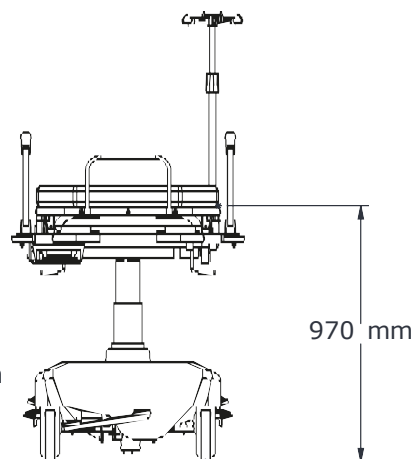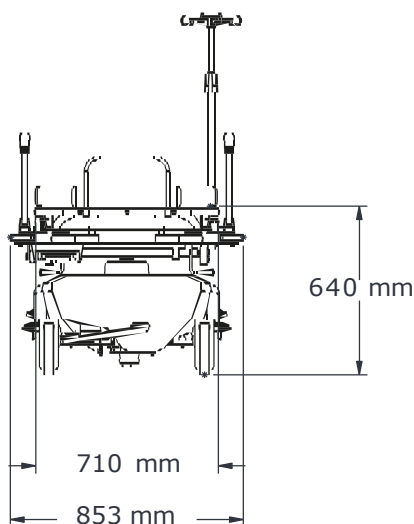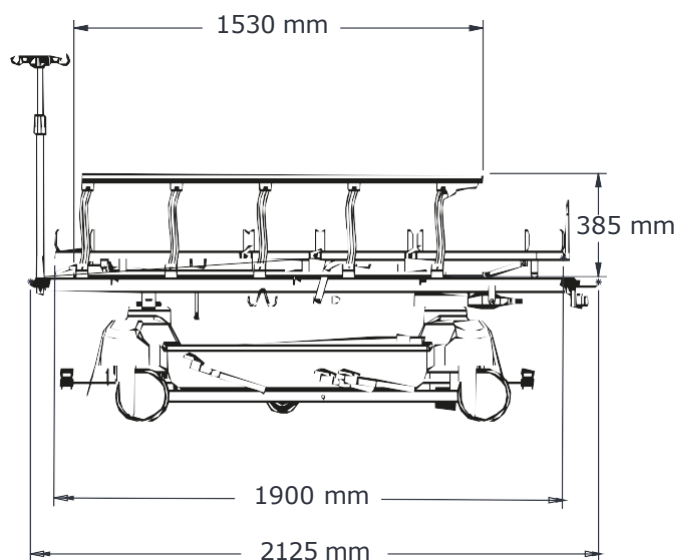

## DIMENSIONES EXTERNAS\*

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Largo    | 83.6 in (2125 mm)                    |
| Ancho    | 33.6 in (853 mm)                     |
| Barandas | 15.2 in X 60.2 in (385 mm X 1530 mm) |

## SUPERFICIE DEL PACIENTE\*

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Largo | 74.8 in (1900 mm) |
| Ancho | 27.9 in (710 mm)  |

## MOVIMIENTOS\*

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Flexión espalda       | 0° a 90°         |
| Flexión rodillas      | 0° a 40°         |
| Altura mínima         | 25.2 in (640 mm) |
| Altura máxima         | 38.2 in (970 mm) |
| Trendelenburg         | 16°              |
| Trendelenburg inverso | -16°             |

\*Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: grados  $\pm 3^\circ$  dimensiones  $\pm 1$  in (25.4 mm).

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR\*

- Capacidad de carga segura 500.4 lbs (227 Kg).
- Flexión espaldas asistido por amortiguador neumático.
- Flexión pies mecánico asistido por manivela retráctil.
- Cambio de altura, trendelenburg e inverso con operación de mano libre, asistidos por sistema hidráulico mediante pedales.
- Tendido de 4 secciones en polímero acrílico radiotransparente.
- Porta chasis integrado al marco de la camilla para transporte de placas rayos X.
- Barandilla de seguridad desmontable en sección pies.
- Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, 3.1 in (80 mm) de espesor, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex.
- Barandas laterales de seguridad, plegables, seguro de liberación retráctil, accionamiento con una mano, al ser accionadas reposan a nivel del tendido, fabricadas en polímero de alto impacto y superficie en aluminio de fácil desinfección.
- Ruedas parachoques de caucho en las cuatro esquinas.
- Asas de empuje en los extremos de la camilla.
- Soporte para bolsa de drenaje en ambos lados de la camilla.
- Soportes para correas de sujeción en tórax y piernas.
- Porta suero plegable o graduable en acero inoxidable con 4 ganchos o receptáculos de servicio y seguro de liberación fabricados en polímero. Capacidad de carga 28.6 lb (13 Kg).
- Soportes porta suero en las esquinas de la camilla.
- Cubierta inferior termoformada y soporte para ubicar tanque de oxígeno y/o pertenencias del paciente.
- Ruedas en poliuretano de 8 in (203.2 mm) libres de mantenimiento.
- Quinta rueda direccional retráctil y freno centralizado asistidos por pedales en los extremos de la camilla.

## FABRICACIÓN Y ACABADO\*

- Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

## ACCESORIOS OPCIONALES\* Con costo adicional

- Porta suero inoxidable extra.
- Soporte tanque de oxígeno vertical.
- Mesa porta monitor con soporte para historia clínica.

## NOTA

\*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

\*\*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.



@mubimedical - [info@mubimedical.com](mailto:info@mubimedical.com) - [www.mubimedical.com](http://www.mubimedical.com)

|                         |                            |                    |                         |                    |                      |                                   |                      |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ELABORÓ: Diseño Gráfico | REVISÓ: Diseño de Producto | APROBÓ: Ingeniería | APROBÓ: I+D Electrónico | APROBÓ: Coord. SIG | APROBÓ: Dir. Técnico | APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA | FECHA ACTUALIZACIÓN: |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|

**TRANSFORMAMOS  
ESPACIOS,  
MEJORAMOS  
VIDAS**



**Medellín – Colombia**  
Calle 2 # 50-185  
(57) 604 285 2838

**Cali – Colombia**  
Calle 18 # 118-85  
(57) 602 489 6999

